


CardioSnip



Kurzanleitung für die
CardioSnip[®] Auswertung

1. Laden Sie im iTunes App Store die kostenlose CardioSnip® App auf Ihr iPad.

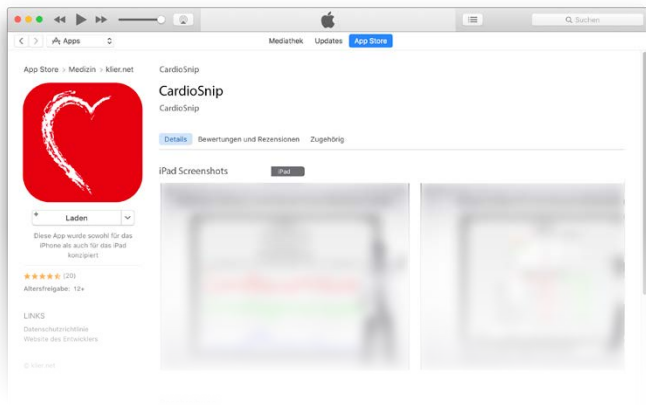


2. Achten Sie darauf, dass Ihr iPad mit dem Internet verbunden und Bluetooth aktiviert ist. Jetzt können Sie das CardioSnip® Gerät via Bluetooth mit der App verbinden, indem Sie auf den Startknopf drücken.


3. Öffnen Sie auf Ihrem iPad die CardioSnip® App




4. Verbinden Sie das CardioSnip® Gerät mit der App, indem Sie auf dem iPad die Gerätenummer anwählen. Der Download beginnt automatisch. Warten Sie, bis er ganz abgeschlossen ist.

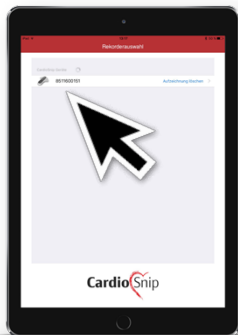

5. Jetzt können Sie Ihre Werte eintragen (Alter, Schlafens- und Aufstehzeit).

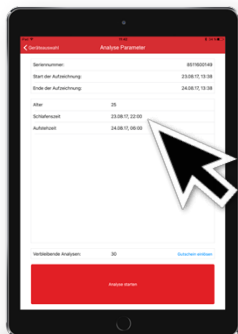

6. Anschliessend klicken Sie auf «Gutschein einlösen».

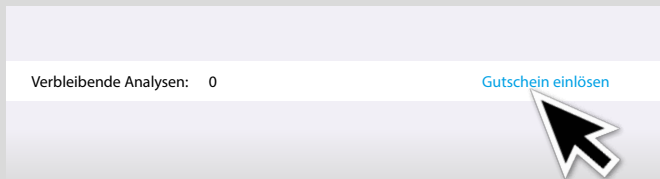

7. Registrieren Sie sich mit Ihrem persönlichen CardioSnip® Code für Auswertungen.

Geben Sie den Code in das Textfeld ein und klicken Sie dann auf Registrieren

Abbrechen **Registrieren**

8. Sie haben jetzt die Registration erfolgreich abgeschlossen und können die Auswertung starten.

Besuchen Sie uns bei Fragen oder Unklarheiten unter www.cardiosnip.com oder schreiben Sie an support@cardiosnip.com



MediService AG, Ausserfeldweg 1, CH-4528 Zuchwil
Telefon 0848 40 80 40, Fax 0848 40 80 41
contact@mediservice.ch, www.mediservice.ch

MediService, ein Unternehmen der Galenica Gruppe