


# **CardioSnip**



**Kurzanleitung für die  
CardioSnip<sup>®</sup> Messung**

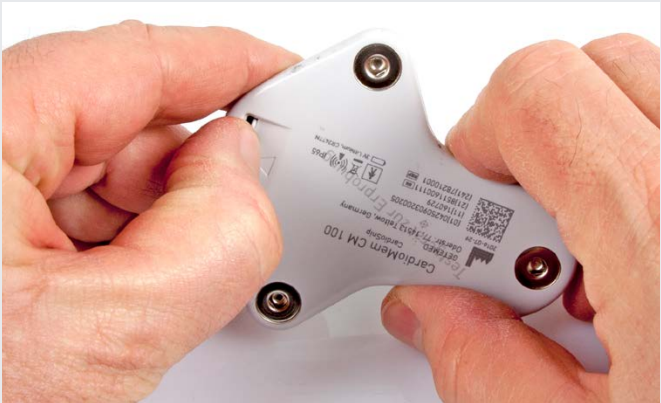

Entriegeln Sie auf der Rückseite des CardioSnip® Geräts die Klappe für das Batteriefach und legen Sie die Batterie ein.



**Wichtig:** Das CardioSnip® Gerät nicht einschalten, bevor es am Körper befestigt ist.




Befestigen Sie drei der beigelegten Klebeelektroden an den Druckknopfstellen.

Desinfizieren Sie die Hautstellen, an denen Sie das Cardio-Snip® Gerät befestigen werden. Die Klebestellen auf der Haut müssen haarfrei sein, d.h. behaarte Stellen vorher gründlich rasieren.






Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie von den Elektroden.  
**Wichtig:** Die Elektroden dürfen nicht verkleben.

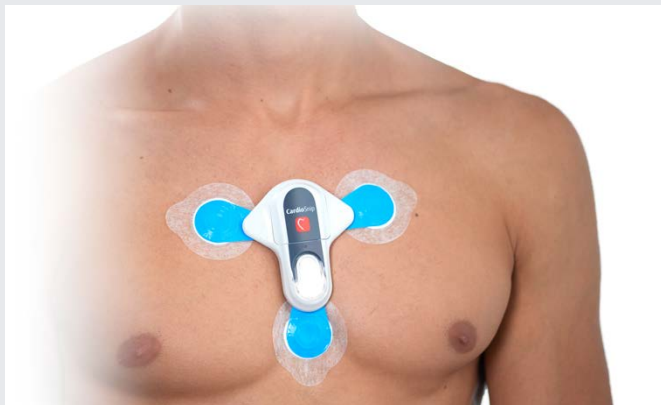

Befestigen Sie jetzt das CardioSnip® Gerät an den vorher desinfizierten Hautstellen in der Brustmitte (Variante 1).

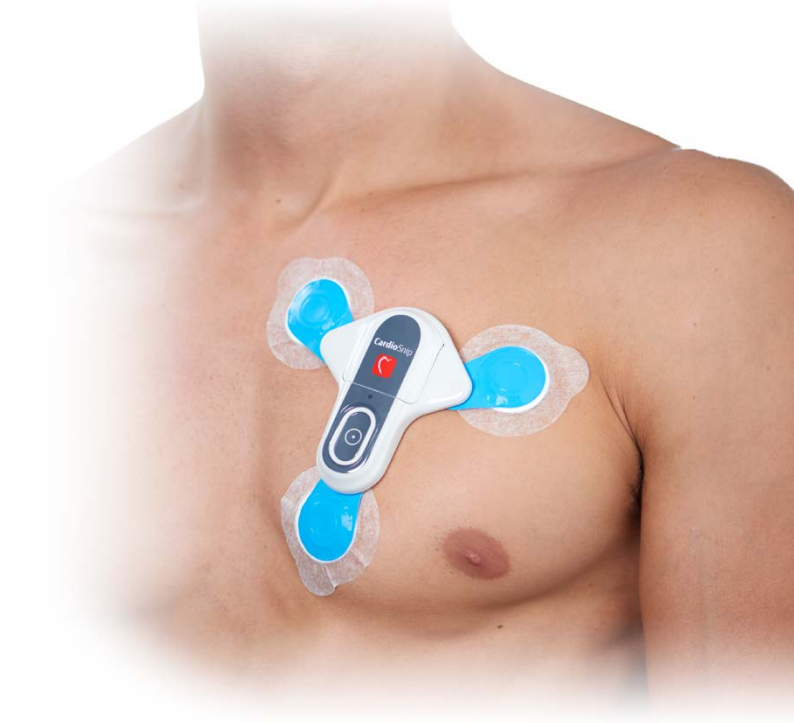

So können Sie das CardioSnip® Gerät ebenfalls platzieren (Variante 2).

**Wichtig:** Das CardioSnip® Gerät muss vor dem Duschen oder Baden entfernt werden (nicht ausschalten). Es sollte nicht länger als 10 Minuten vom Körper getrennt sein.


Wir empfehlen, nach dem Duschen oder Baden neue Elektroden zu verwenden.




Sobald das CardioSnip® Gerät mit den drei Elektroden auf der Haut befestigt ist, drücken Sie den Startknopf.

Nach dem Piepton leuchtet die Kontrolllampe grün.



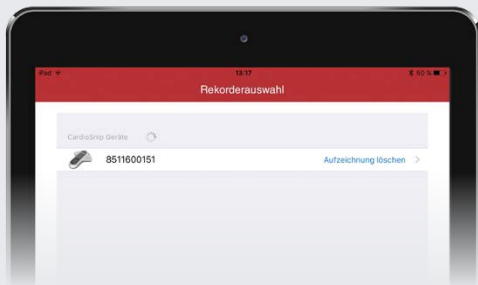

Achten Sie darauf, dass Ihr iPad mit dem Internet verbunden und Bluetooth aktiviert ist. Verbinden Sie das CardioSnip® Gerät mit der CardioSnip® App und wählen Sie Ihre Gerätenummer an.

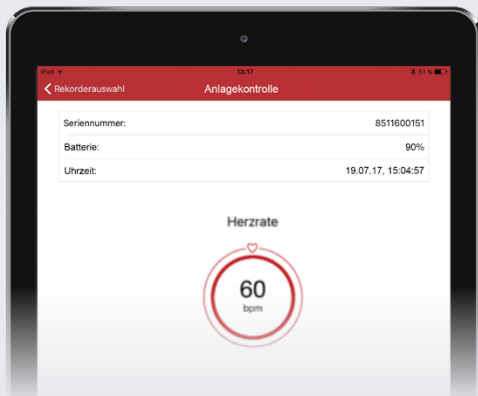

Kontrollieren Sie Datum, Zeit und Batteriestatus. Dann drücken Sie auf «Aufnahme starten». Nach einem weiteren Piepton blinkt die Kontrolllampe im 5-Sekundentakt grün. Das CardioSnip® Gerät ist jetzt aktiviert und misst.



Nach der Messdauer von 24 Stunden ertönt ein Piepton und das CardioSnip® Gerät schaltet automatisch aus. Jetzt können Sie es entfernen und die gebrauchten Elektroden entsorgen. Anschliessend werten Sie Ihre Messung mit der Cardio-Snip® App aus.

**Besuchen Sie uns bei Fragen oder Unklarheiten unter [www.cardiosnip.com](http://www.cardiosnip.com) oder schreiben Sie an [support@cardiosnip.com](mailto:support@cardiosnip.com)**



MediService AG, Ausserfeldweg 1, CH-4528 Zuchwil  
Telefon 0848 40 80 40, Fax 0848 40 80 41  
[contact@mediservice.ch](mailto:contact@mediservice.ch), [www.mediservice.ch](http://www.mediservice.ch)

MediService, ein Unternehmen der Galenica Gruppe